


Sabina II

Guía Rápida

Español

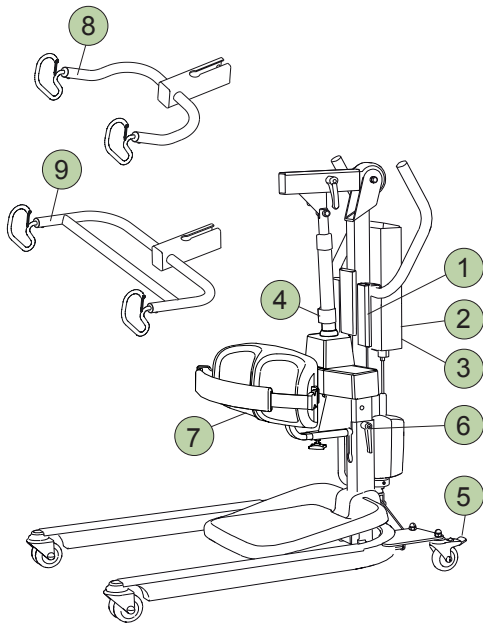

Instrucciones de seguridad

- Lea detenidamente la guía de instrucciones de la grúa y de los accesorios de elevación antes de usar estos productos.
- Planifique minuciosamente la operación de elevación.
- Antes de elevar al paciente de la base donde se encuentre, pero con las cintas debidamente tensadas, es muy importante comprobar que los lazos estén correctamente enganchados en la percha.
- **Carga máxima elevación activa: 200 kg (440 lbs.)**
Carga máxima elevación pasiva: 150 kg (330 lbs.)


Para mantener la carga máxima, es necesario el uso de accesorios diseñados para la misma carga o una superior.

¡IMPORTANTE!

Esta guía rápida no sustituyen a la guía de instrucciones de la grúa, la cual se puede descargar desde www.liko.com.


1 Mando

Sabina II EE Sabina II EM

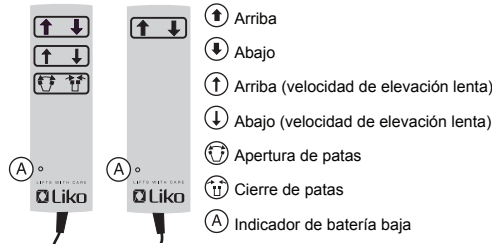


2 Parada de emergencia


Activación:

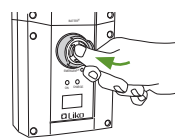

Reposición:

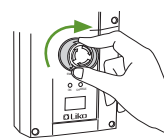


3 Bajada y elevación eléctrica de emergencia

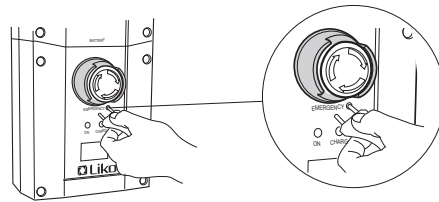

⚠ ¡El objeto utilizado para presionar no debe ser puntiagudo porque puede dañar la caja de control!


4 Bajada mecánica de emergencia

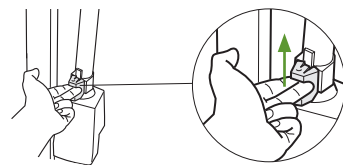


5 Bloqueo de las ruedas



Ajustes

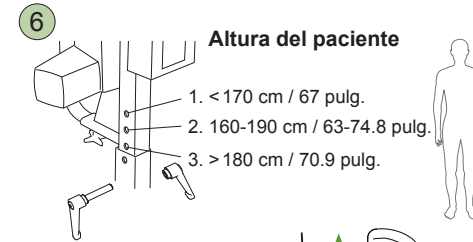


7 Reposapiernas

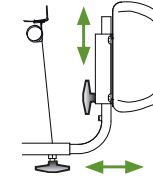


Uso alternativo


8 Percha 350

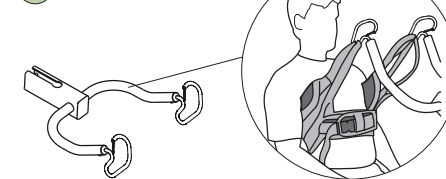

9 Percha Comfort

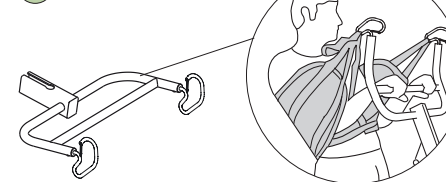

Carga de baterías

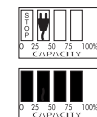

¡Cargar inmediatamente!

Totalmente cargado

- Cargue la grúa regularmente después de haberla utilizado.
- La grúa no funciona durante el proceso de carga de la batería.
- **El botón de parada de emergencia no debe estar presionado durante la operación de carga.**

Ergonomía

- Evite las elevaciones manuales – deje que la grúa haga el trabajo.
- No se estrese – trabaje con calma y metódicamente.
- Piense en su espalda – trabaje erguido y con la espalda recta.
- Reduzca el efecto de palanca: trabaje cerca del paciente y de la grúa.

Limpeza

Cuando sea necesario, limpie la grúa con un paño húmedo, utilizando agua tibia o desinfectante.

Posibles problemas

Compruebe que:

- la parada de emergencia no está pulsada, ver 2
- la batería está cargada
- el mando está correctamente conectado.

Otras guías rápidas

La guía rápida para las grúas y arneses de Liko pueden descargarse desde el sitio Web www.liko.com.

© Copyright Liko AB



Intertek



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricante:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se